

GUANTE LÁTEX CON POLVO

Versión: 14 Fecha: 10/25

FT_CU-GDLTX-BL-BACP

CUATROGASA
profesionales como tú



NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todo tipo de alimentos excepto los alimentos ácidos

Reglamento (UE) 2017/745: Dispositivo Médico Clase I

EN 455-1:2020+A2:2024	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
EN 455-2:2024	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
EN 455-3:2023	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
EN 455-4:2009	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN ISO 21420:2020	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo C	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo C

QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)
Ácido sulfúrico 96 % (N° CAS 7664-93-9)	L	1	99,4
Ácido nítrico 65 % (N° CAS 7697-37-2)	M	1	53,3
Peróxido de hidrógeno 30 % (N° CAS 7722-84-1)	P	1	-92,5

Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Cat III

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de látex, con polvo, color blanco, (Producto sanitario-Clase I), de uso dual para la protección del trabajador y el paciente frente a riesgos químicos y biológicos (EPI – Cat. III). Desechable y no estéril. Ambidiestro.
- Interior: con polvo para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: lisa.
- Peso (g): $4,1 \pm 0,5$ (XS), $4,4 \pm 0,5$ (S), $5,0 \pm 0,5$ (M), $5,7 \pm 0,5$ (L), $6,5 \pm 0,5$ (XL) (AQL 4.0).
- Longitud (mm): ≥ 240 . (AQL 4.0).
- Ancho (mm): ≤ 80 (XS), 80 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 110 ± 10 (L), ≥ 110 (XL) (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): $\geq 0,08$ (AQL 4.0).
- AQL para defectos mayores de 4.0 y menores de 6.0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Estos guantes contienen látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso y busque atención médica de inmediato. Antes de utilizarlos, examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. Se recomienda comprobar que los guantes son para el uso previsto. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en un dispensador, que es adecuado para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14
CU-GDLTX-BL-BACP	XS	8436026599006	18436026599003
	S	8436026599013	18436026599010
	M	8436026599020	18436026599027
	L	8436026599037	18436026599034
	XL	8436026599044	18436026599041

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds

Ancho: 20 cm

Alto: 11 cm

Largo/profundo: 6 cm

Caja (DUN): 10 Dispensadores

Ancho: 22,5 cm

Alto: 21 cm

Largo/profundo: 31 cm

Capas/Palet: 7

Cajas/Capa: 12

Cajas/Palet: 84

Altura palet: 1,62 m

