

PACK PRACTI-BABY



CONTIENE

1 Practi-Baby, 1 Manual de usuario, 5 pulmones, 2 válvulas y 1 bolsa de transporte.

CERTIFICADO DE GARANTIA



Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. No obstante, de surgir cualquier problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas defectuosas en origen, le rogamos lea las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantía, ENFAVI, S.L. garantiza que este producto se encuentra libre de defectos materiales y de mano de obra en el momento de su compra por un período de DOS AÑOS desde su entrega.

Si durante el período de validez de la garantía, el producto presentara algún defecto atribuible al proceso de fabricación, debido a materiales y/o mano de obra, el consumidor habrá de informar al distribuidor oficial en el plazo máximo de diez días desde que tuvo conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor oficial entre la sustitución de la pieza dañada o su reparación.

CONDICIONES DE LA GARANTIA:

Datos y documentación: Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra y el albarán de entrega, siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos: nombre completo y dirección del comprador.

Exclusiones: Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes:
 -Daños y/o averías sufridas por el producto como consecuencia del mal uso, caídas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la utilización del producto para fines distintos del uso a que está destinado.
 -Daños y/o averías producidos por el uso de agentes externos como calor u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos.
 -Daños y/o averías debidos a un mantenimiento inadecuado o a la falta de limpieza.
 -Daños y/o averías derivadas del uso de recambios no originales de la marca.

Ámbito geográfico: La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por ENFAVI,S.L. o por un distribuidor asignada por ENFAVI,S.L.

Anulación de la garantía: La garantía del producto quedará invalidada:
 -En los supuestos de daños causados por las reparaciones llevadas a cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por ENFAVI, S.L., así como si se reemplazan o se utilizan piezas adicionales o accesorios que no sean originales.
 -Por manipulación de los datos de la factura, ticket de compra o albarán de entrega.

CPR MANIKIN PRACTI-BABY

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS



PRÁCTICA DE RESPIRACIÓN REAL

PRACTI-BABY EL SIMULADOR PEDIÁTRICO + REALISTA
 Por su aspecto, tamaño, peso y movimientos, Practi-Baby permite realizar una correcta RCP pediátrica adaptándose según las necesidades de formación.



PRÁCTICA DE RESPIRACIÓN REAL

- Exclusivo sistema de respiración incluyendo nariz con función real.
- El movimiento de la cabeza permite una correcta práctica de la respiración.

FEEDBACK AUDIBLE

Gracias al selector, se ofrece la opción de realizar la práctica con o sin click.

OTRAS VENTAJAS DE PRACTI-BABY



CÁNULA GUEDEL

- Para practicar con la cánula Guedel, colocar la máscara sin válvula.



FORMACIÓN DEA

El uso de parches no deja residuos en la piel.

MONTAJE DE PRACTI-BABY



Retirar el peto.



Retirar la máscara.



Pasar el pulmón por debajo de la mandíbula.



Unir la válvula al pulmón.



Encajar la válvula correctamente.



Colocar el pulmón mediante la pegatina sobre el torso.



Colocar la máscara comprobando que nariz, boca y pestaña de la parte superior encajan correctamente.



Colocar el peto.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


Para asegurar una máxima higiene, el fabricante recomienda la limpieza de Practi-Baby después de cada uso siguiendo las instrucciones a continuación:



Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios y la cara, separando la máscara de la cabeza después de cada ejercicio realizado por el alumno.



Para una desinfección más completa, sumergir la máscara en un recipiente con producto desinfectante, limpiar cuidadosamente y mantener seca para un correcto uso.

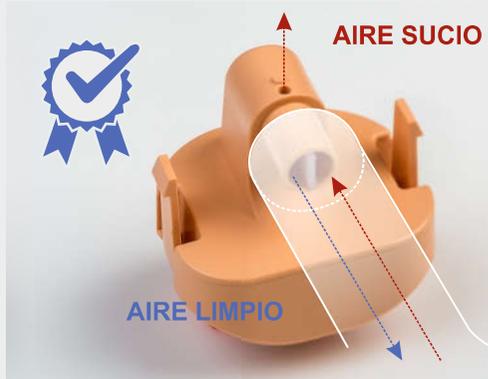

Después de cada uso la válvula de Practi-Baby se debe desinfectar y dejar secar para un correcto funcionamiento.



El pulmón de Practi-Baby es semidesechable y apto para realizar una sesión de entrenamiento por un grupo de varias personas sin necesidad de cambiarlo. Si durante la práctica el pecho deja de elevarse, compruebe que el pulmón no está humedecido, en cuyo caso se debe sustituir por uno nuevo.

REPUESTOS DE PRACTI-BABY



PULMÓN
(Ref. SP-001 (PB))



VÁLVULA
(Ref. SP-002 (PB))



MÁSCARA
(Ref. Face-PB)



PETO
(Ref. Chest-PB)

PROTECCIÓN DURANTE LA PRÁCTICA RCP



La protección durante la formación se complementa con el uso de mascarillas protectoras de respiración.



Para asegurar una limpieza correcta del simulador, utilice las toallitas desinfectantes.