

PHILIPS  
RESPIRONICS


*DreamWisp*



**SANISUS MEDICAL**  
Material y Equipamiento Médico

**Comodidad**  
con cada movimiento



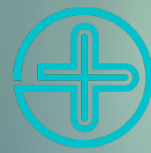

**SANISUS MEDICAL**  
Material y Equipamiento Médico

# Comodidad con cada movimiento

Presentamos la mascarilla de mínimo contacto DreamWisp de Philips Respironics, la marca n.º 1 en terapia\* del sueño† de especialistas del sueño de EE. UU. DreamWisp ayuda a sus pacientes a dormir cómodamente con cada movimiento, ya que combina la libertad del revolucionario diseño de tubo en la parte superior de la cabeza de DreamWear con el sellado de la almohadilla nasal de mínimo contacto de Wisp.

Ahora, puede proporcionar a sus pacientes una solución innovadora que les permita dormir como lo desean sin tener un tubo restrictivo en la cara. El diseño de DreamWisp dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente, y la conexión del tubo en la parte superior de la cabeza permite que los pacientes duerman en cualquier posición que deseen, boca abajo, de costado o de espaldas.

## Beneficios de DreamWisp

- El tubo en la parte superior de la cabeza permite a los pacientes dormir en cualquier posición que deseen
- El flujo de aire a través del marco de la mascarilla permite a los pacientes dormir cómodamente
- La almohadilla nasal de mínimo contacto proporciona comodidad y sellado
- El arnés de cuatro puntos proporciona estabilidad



# Philips DreamWisp

**Marco de silicona**  
Material ligero y flexible  
diseñado para la comodidad

**Flujo de aire en el marco**  
El diseño único permite  
que el flujo de aire a  
través del marco ayude  
a los pacientes a dormir  
cómodamente en  
cualquier posición


**Arnés de cuatro puntos**  
Proporciona estabilidad  
y ajuste excepcional

**Clips magnéticos**  
Para colocar y  
liberar fácilmente

**Conexión del tubo en  
la parte superior de la cabeza**  
Proporciona libertad de  
movimiento durante toda  
la noche

**Campo de visión abierto**  
Use anteojos, lea  
y vea televisión

**Diseño de la almohadilla  
nasal de mínimo contacto**  
Para un ajuste y  
comodidad excepcionales

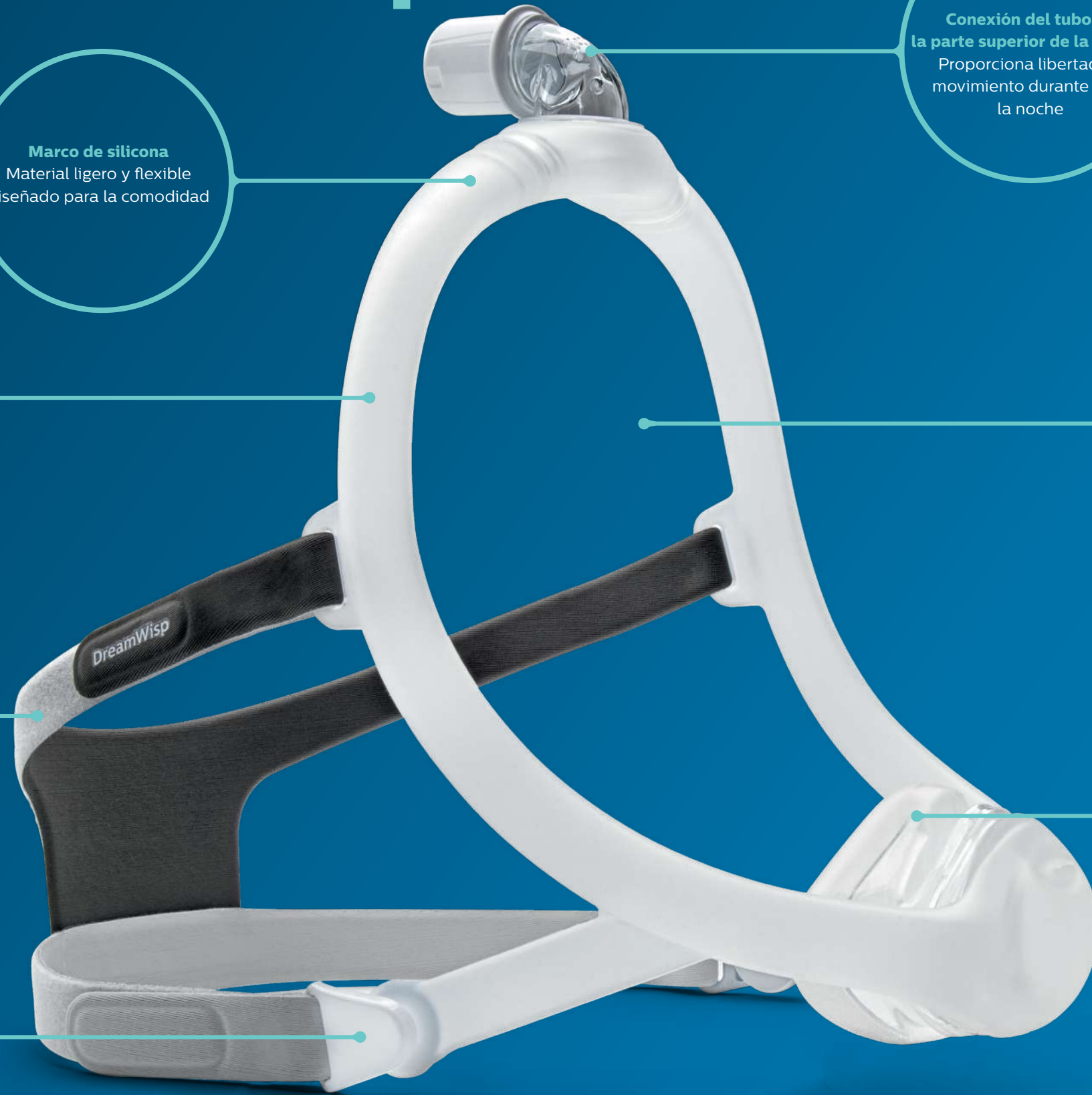

**SANISUS MEDICAL**  
Material y Equipamiento Médico



# Vea lo que dicen los médicos sobre **DreamWisp**

El 97 % de los médicos dijo que recomendaría DreamWisp a otro médico, mientras que el 73 % recomendaría ResMed AirFit N20\*

El 97 % de los médicos dijo que recomendaría DreamWisp a un paciente, mientras que el 73 % recomendaría ResMed AirFit N20\*

Los médicos están más satisfechos con el sellado de DreamWisp que con el sellado de ResMed AirFit N20\*

El 87 % de los médicos dijo que la mascarilla DreamWisp se ajusta mejor que la del ResMed AirFit N20\*

Los médicos estaban más satisfechos con la identificación del tamaño correcto con DreamWisp que con ResMed AirFit N20\*

\*Prueba de facilidad de uso del clínico de abril de 2018, n = 30 mascarillas comparadas incluidas ResMed Airfit N20 y PRI DreamWisp



## Guía de adaptación de pacientes DreamWisp

Siga las instrucciones para comenzar a colocarse la mascarilla DreamWisp



1

Seleccione la almohadilla que se ajuste al ancho de su nariz sin bloquear las fosas nasales. La parte superior de la almohadilla puede quedar entre el puente y la punta de la nariz. Hay cinco tamaños de almohadillas disponibles: extra pequeña, pequeña, mediana, grande, extra grande



2

Retire uno o ambos clips magnéticos del receptor de clips magnéticos.



3

Tire del arnés por arriba de la cabeza.



4

Coloque la almohadilla sobre la nariz.



5

Sujete los clips magnéticos a los receptores de clips magnéticos.



6

Para ajustar el arnés, despegue las lengüetas inferiores del arnés de la tela. Ajuste uniformemente la longitud de las correas. Presione las lengüetas contra la tela para volver a colocarlas. Repita este paso con las correas superiores.



7

Coloque la mascarilla hasta que encaje cómodamente. Cuando haya terminado, el codo debe descansar arriba de la cabeza. La almohadilla debe apoyarse, de forma cómoda, sobre la cara sin bloquear las fosas nasales.

Nota: Lea las instrucciones de uso para obtener información adicional sobre el ajuste.



**SANISUS MEDICAL**  
Material y Equipamiento Médico

# Información de pedido

Mascarilla nasal DreamWisp con configuraciones de conector medio

Número de parte

DreamWisp con arnés, almohadillas chicas, medianas y grandes

1137916

DreamWisp con arnés, almohadilla mediana

1137934

## Obtenga más información

Para obtener más información,  
visite [www.sanisusmedical.com](http://www.sanisusmedical.com)

