



mindray
healthcare within reach

+ Rápido
+ Inteligente

BeneHeart C Series



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

Información General

Conector Electrodo

Cambio de IDIOMA

Indicador de Estado

Ventana de Fecha
Caducidad Electrodo

Cambio de Modo
Adulto / Pediatrico

Botón de Descarga



Tutoriales

- 1 Puesta en Marcha
- 2 Sustitución de Batería
- 3 Sustitución de los Electrodo
- 4 Video Presentaciones





SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

1 Puesta en Marcha

2 Sustitución de Batería




Puesta en Marcha y Sustitución de Batería



Tras Colocar la Batería el equipo inicia un TEST de Puesta en Marcha
Tan solo hay que seguir las instrucciones

Puesta en Marcha

Tras Colocar la Batería el equipo inicia un TEST de Puesta en Marcha
Tan solo hay que seguir las instrucciones hasta finalizar el proceso

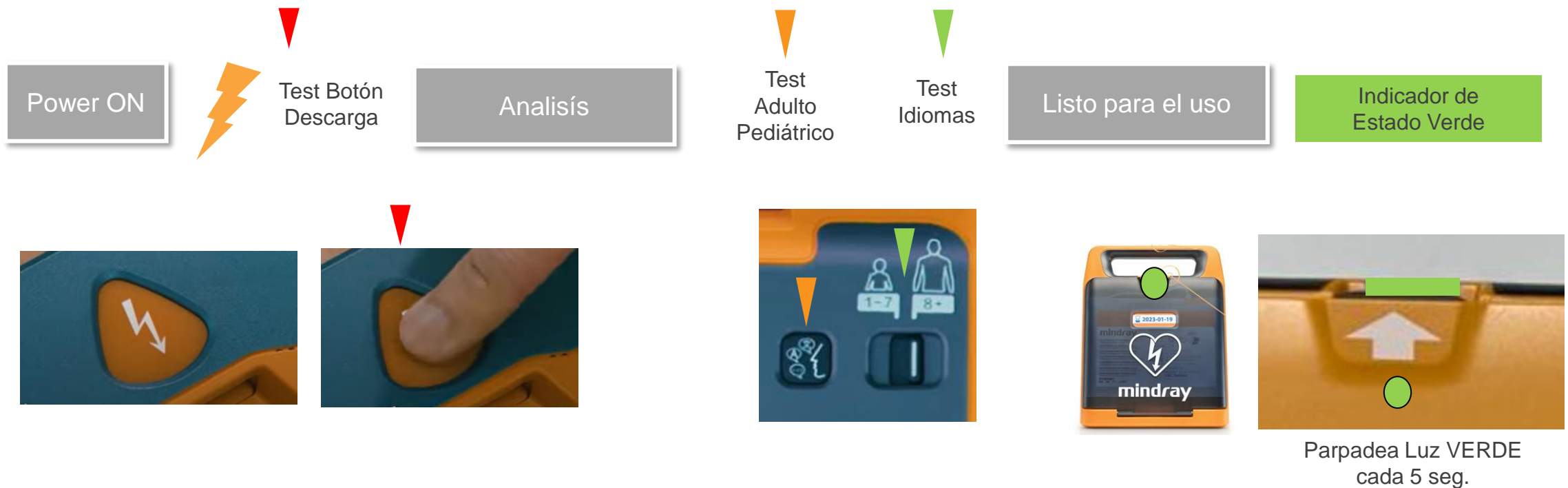

Puesta en Marcha y Sustitución de Batería

1

Retirar la tapa trasera



1

2

Retirar la tapa trasera



2

3

Coger la Batería



3

4

Insertar la Batería
haciendo coincidir los
terminales



4

5

Colocar la tapa trasera



5

6

Apretar los Tornillos de
seguridad de la tapa
trasera



6



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

3

Sustitución de Electrodo



Sustitución de los Electrodo



Los Electrodo son de un solo uso, asi que deben cambiarse ...

- tras cualquier evento / aplicación de tratamiento
- ... o cuando su fecha de caducidad lo indique.
- Cada 5 años



Localizar el Conector



Retirar la tapa protectora



Desconectar el Electrodo existente y reconectar el nuevo



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

4

Video Presentaciones

<https://youtu.be/XMJRQrvUCm4>

<https://youtu.be/g5MPgwQXmBs>

<https://youtu.be/QGL1xJHrAsQ>




Video Presentaciones



<https://youtu.be/XMJRQrvUCm4>



<https://youtu.be/g5MPgwQXmBs>

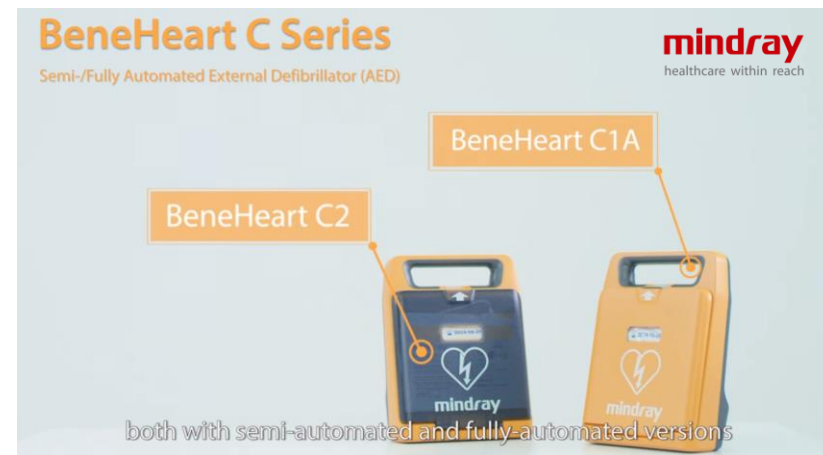

<https://youtu.be/QGL1xJHrAsQ>



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

**Gracias
por su atención!**

mindray
healthcare within reach

