

GUANTE LÁTEX SIN POLVO

Versión: 14 Fecha: 09/25

FT_CU-GDLTX-BL-BASP

CUATROGASA
profesionales como tú



NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todo tipo de alimentos excepto los alimentos ácidos

Reglamento (UE) 2017/745: Dispositivo Médico Clase I

EN 455-1:2020+A2:2024	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
EN 455-2:2024	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
EN 455-3:2023	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
EN 455-4:2009	Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN ISO 21420:2020	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	QUÍMICO				COD.	NIVEL	Degradación (%)
 KPT	Hidróxido sódico 40 % (N° CAS 1310-73-2)				K	4	-72,4
	Peróxido de hidrógeno 30 % (N° CAS 7722-84-1)				P	6	-64,1
	Formaldehído 37 % (N° CAS 50-00-0)				T	6	-81,7
Niveles	1	2	3	4	5	6	
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	



Cat III

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de látex, sin polvo, color blanco (Producto sanitario-Clase I), de uso dual para la protección del trabajador y el paciente frente a riesgos químicos y biológicos (EPI – Cat. III). Desechable y no estéril. Ambidiestro.
- Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: lisa.
- Peso (g): 4,2 ± 0,5(XS), 4,4 ± 0,5(S), 5,0 ± 0,5(M), 5,6 ± 0,5(L), 6,3 ± 0,5(XL) (AQL 4.0).
- Longitud (mm): ≥ 240 (AQL 4.0).
- Ancho (mm): ≤ 80 (XS), 80 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 110 ± 10 (L), ≥ 110 (XL) (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): ≥ 0,08 (AQL 4.0).
- AQL para defectos mayores de 4.0 y menores de 6.0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Estos guantes contienen látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso y busque atención médica de inmediato. Antes de utilizarlos, examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. Se recomienda comprobar que los guantes son para el uso previsto. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en un dispensador, que es adecuado para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14
CU-GDLTX-BL-BASP	XS	8436026599051	18436026599058
	S	8436026599068	18436026599065
	M	8436026599075	18436026599072
	L	8436026599082	18436026599089
	XL	8436026599099	18436026599096

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds

Ancho: 22 cm

Alto: 11 cm

Largo/profundo: 6,8 cm

Caja (DUN): 10 Dispensadores

Ancho: 22,5 cm

Alto: 23 cm

Largo/profundo: 35,5 cm

Capas/Palet: 6

Cajas/Capa: 10

Cajas/Palet: 60

Altura palet: 1,53 m

