

GUANTE NITRILO EXTREME NEGRO

Versión: 10 Fecha: 03/2025

FT_CUGDNIT-NE-XBSP



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de nitrilo Extreme, color negro, desechable, para la protección del trabajador frente a riesgos químicos y biológicos (EPI-Cat. III). Anatómico (no ambidiestro). Marca CUATROGASA.
- Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.
- Peso (g): $5,5 \pm 0,5$ (S), $6,0 \pm 0,5$ (M), $6,5 \pm 0,5$ (L), $7,0 \pm 0,5$ (XL) (AQL 4.0).
- Longitud (mm): ≥ 235 (AQL 4.0).
- Ancho (mm): 85 ± 10 (S), 95 ± 10 (M), 105 ± 10 (L), 115 ± 10 (XL) (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): $\geq 0,08$ (AQL 4.0).
- AQL para defectos mayores de 4.0 y menores de 6.0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todos los alimentos

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN ISO 21420:2020	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B	QUÍMICO				COD.	NIVEL	Degradación
 KPT	Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2)				K	6	1,4
	Peróxido de hidrógeno 30% (CAS Nº 722-84-1)				P	6	24
	Formaldehído 37% (CAS Nº 50-00-0)				T	6	10,9
Niveles	1	2	3	4	5	6	
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	



INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Esto guantes pueden contener productos químicos residuales utilizados en su fabricación que pueden causar reacciones alérgicas en la piel en algunas personas. Si ocurre alguna reacción en la piel, suspenda su uso. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en un dispensador, que es adecuado para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14
CU-GDNIT-NE-XBSP	S	8436026599679	18436026599676
	M	8436026599686	18436026599683
	L	8436026599693	18436026599690
	XL	8436026599617	18436026599614

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds

Ancho: 23,5 cm

Alto: 12,5 cm

Largo/profundo: 7 cm

Caja (DUN): 10 Dispensadores

Ancho: 26 cm

Alto: 24,5 cm

Largo/profundo: 36 cm

Capas/Palet: 6

Cajas/Capa: 9

Cajas/Palet: 54

Altura palet 1,62 m

